



## Manual de Instruções

Versão 01 - Data: 13/12/2023

### Estetoscópios

#### Indicação de uso / Finalidade:

O estetoscópio é um dos principais equipamentos para a captação de informações orgânicas durante a execução do exame físico pelo emprego da ausculta.

O estetoscópio é um instrumento para a condução dos sons corporais do paciente até o examinador, destinado ao diagnóstico clínico, sendo utilizado para avaliação dos sons cardíacos, pulmonares, abdominais, arteriais, articulares, dentre outros.

#### Princípio de funcionamento:

Os sons captados pelos receptores são conduzidos pelo tubo e hastes até as olivas e o conduto auditivo.

#### Instruções para uso do produto:

1. Este instrumento possui olivas adaptáveis ao conduto auditivo para maior conforto. Estas olivas possuem tamanho universal, possibilitando um maior conforto e minimizando o ruído ambiente.
2. Para o ajuste do ângulo das hastes, segure com uma das mãos uma das hastes e com a outra mão ajuste o tubo ao devido ângulo.

3. Quando as olivas estiverem ajustadas adequadamente ao conduto auditivo, os tubos deverão estar na posição frontal.

O uso inadequado do estetoscópio poderá acarretar em selamento acústico deficiente e, em alguns casos, bloqueio completo do som.

4. Para redução da tensão das hastes, flexione-as suavemente (abrindo).

5. Para aumentar a tensão das hastes, flexione-as suavemente (fechando).

6. Ao utilizar o produto, observe se o receptor está aberto. Você poderá abrir o headset movimentando-o 180° para auscultar com a campânula enquanto um receptor é utilizado.

#### Imagens:



Estetoscópio simples



Estetoscópio duplo



Estetoscópio duplo Rappaport



Estetoscópio duplo cardiológico

### Condições de armazenamento:

Mantenha o instrumento em local seco, protegido e ventilado. Evitar deixá-lo exposto a temperaturas extremas, umidade e sol.

### Condições para o transporte:

Mantenha o instrumento em local seco, protegido e ventilado. Evitar deixá-lo exposto a temperaturas extremas, umidade e sol.

### Condições de manipulação:

Após a utilização é recomendável a higienização das olivas e dos receptores, usando um pano levemente umedecido em solução anti-séptica ou desinfetante. Não utilize esterilização térmica. Evite o contato do produto com água.

**Validade: Indeterminada**

### FABRICANTE E DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MASTER MEDIKAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 10.686.941/0001-84

ENDEREÇO: Rua Ver. Victor Manoel de Magalhães, 441

Por do Sol - CEP: 37538-082 - Santa Rita do Sapucaí - MG

TEL.: (35) 3471-3682

SITE: [www.mastermedikal.com.br](http://www.mastermedikal.com.br)

**Responsável Técnico:** FABIANO VALIAS DE CARVALHO

CREA N° 140720418-1

AFE ANVISA N°: 8.06.020-3 (G8W925M38M17)

NOTIFICAÇÃO ANVISA N°: 80602030064

### DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Medmax Comércio de Equipamentos Médicos e Similares Ltda

Av. Cauaxi, n° 293 – Alpha Green Alphaville

CEP: 06454-020 – Alphaville – Barueri – SP

Tel : (11) 4133-6300



## Estetoscópios

### MASTER MEDIKAL

#### MODELOS:

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL SIMPLES ADULTO MKST2A-PR  
ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL SIMPLES ADULTO MKST2A-RO  
ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL SIMPLES ADULTO MKST2A-AZ

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO ADULTO MKST3A-PR  
ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO ADULTO MKST3A-RO  
ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO ADULTO MKST3A-AZ

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO RAPPAPORT ADULTO  
MKST5-PR

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO RAPPAPORT ADULTO  
MKST5-RO

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO RAPPAPORT ADULTO  
MKST5-AZ

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO CARDIOLÓGICO ADULTO  
MKST8A-PR

ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO CARDIOLÓGICO ADULTO  
MKST8A-VI