

Caneta de Controle Eletrocirúrgico Descartável

INDICAÇÕES DE USO:

O dispositivo rígido estéril consiste em uma peça eletro cirúrgica combinadas e eletrodo monopolar indicados para entregar uma corrente eletro cirúrgica de um sistema gerador diretamente para tecidos para cortar/coagular durante um procedimento cirúrgico aberto. Senso válido na forma de caneta afiada. Este é um dispositivo de uso único.

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

1. Verifique a embalagem cuidadosamente antes do uso. Não use se o invólucro estéril estiver violado.
2. Verifique o produto antes do uso. Não use o eletrodo se qualquer corte ou risco estiver visível na instrução.
3. Este produto é fornecido em embalagem estéril para uso único, e não é preparado para re-esterilização.
4. Com segurança, conecte todos os componentes antes do uso.
5. Antes do uso, verifique a conexão do eletrodo com o acessório que será utilizado para garantir encaixe e compatibilidade. Inspeção todos os aparelhos para que estejam conectados ao gerador eletrocirúrgico.
6. Siga as instruções do manual do gerador eletrocirúrgico.
7. Certifique-se de que as configurações do gerador eletrocirúrgico estejam apropriadas antes de iniciar a cirurgia. Utilize a configuração mais baixa possível para alcançar o efeito cirúrgico do dispositivo (isso é importante devido ao potencial de queimas inadvertidas em altas tensões).
8. O eletrodo eletrocirúrgico deve estar em contato com o tecido antes de ligar a caneta eletrocirúrgica.

O produto é de uso único, portanto, recomenda-se descarte após a primeira utilização.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Abra a embalagem e posicione o conteúdo em campo estéril.
2. Se a caneta eletrocirúrgica não tiver o eletrodo instalado, certifique-se de que o eletrodo adequado esteja inserido com segurança no dispositivo.
3. Consulte o manual do gerador para uso apropriado.
4. Antes de inserir o eletrodo, assegure-se de que o acessório ativo não esteja conectado ao gerador eletrocirúrgico ou certifique-se de que o gerador esteja desligado (standby).
5. Segure o eletrodo pelo isolante e insira a haste redonda na caneta eletrocirúrgica até que a isolação esteja totalmente inserida. A haste e a isolação devem encaixar com segurança dentro do dispositivo ativo. Se a haste e/ou a isolação não encaixar, ou a isolação não for inserida, o uso da caneta não é recomendado.

Nota: Eletrodos de loop e fio não são projetados para o uso no modo coagulação. Não ative o gerador no modo coagulação se estiver usando um eletrodo de loop ou fio. A quebra do loop ou do fio pode ocorrer.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

MAster Medikal Industria E Comercio de Equipamentos Médicos Ltda
CNPJ: 10.686.941/0001-84
Endereço: Rua Amazonas, 141 Loteamento Boa Vista II Cep: 37540-000
Santa Rita Do Sapucaí – Minas Gerais
SAC: (35) 3471-3682

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fabiano Valias de Carvalho
Anvisa: 8.06.020-3 (G8W925M38M17)