



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Versão 01 - Data: 13/12/2023

ELETRODO DE ECG MM

Instruções de Uso

Indicações

Os eletrodos de ECG fabricados pela Master Medikal são indicados para utilização para procedimentos de ECG em repouso ou esforço.

Modo de Usar:



Tipo de Paciente: Adulto e Pediátrico

Aplicação:

1. Verifique se os eletrodos e o local a ser utilizado estão limpos.
2. Passe o gel condutor nos eletrodos.
3. Fixar os eletrodos no paciente.
4. Conectar o cabo paciente aos eletrodos.
5. Verificar se as ligações estão corretas.
6. Ligar o aparelho de ECG para iniciar as leituras necessárias.
7. Após o término das leituras, desconecte os eletrodos do cabo paciente e retire os eletrodos do paciente.

8. Execute a limpeza dos eletrodos conforme indicado neste manual de instruções.

Limpeza:

Este **Eletrodo de ECG** deve ser limpo após cada uso e **“ANTES de ser usado em outro paciente”**.

Para limpar o eletrodo siga os seguintes passos:

1. Desconecte o eletrodo do paciente;
2. Elimine o excesso de gel. Limpe os eletrodos com água quente e sabão. Enxague-os cuidadosamente para eliminar qualquer traço de sabão e, então, seque-os

Avisos:

1. A colocação incorreta do Eletrodo pode causar erro nas medições.
2. O movimento também pode interferir no funcionamento.
3. Raspe os pelos do local da aplicação caso necessário.
4. Limpar e desengordurar a pele com água e sabão neutro. Secar completamente o local de aplicação.
5. Não utilize os eletrodos sem o gel condutor, pois ele elimina a diferença de potencial entre a pele e o eletrodo.
6. Não aplicar sobre a pele ferida ou irritada.
7. Não aplicar sobre proeminências ósseas, articulações ou regiões musculares.
8. Durante a realização do exame, se houver a necessidade de substituição dos eletrodos, aplicar os novos em local diferente dos anteriores, para evitar irritação da pele.
9. Durante cirurgias, aplicar os eletrodos o mais distante possível da incisão para evitar fuga de corrente elétrica gerada pelo bisturi elétrico, evitando assim queimaduras.
10. O funcionamento deste eletrodo pode ser afetado por fontes eletromagnéticas intensas, tais como equipamentos eletro-cirúrgicos.
11. Não use este eletrodo durante procedimentos de ressonância magnética nuclear (RNM) ou tomografia computadorizada (TC). A condução de corrente pode causar queimaduras e os aparelhos de RNM e de TC podem causar leituras imprecisas.

12. Se o eletrodo sofrer algum tipo de dano, pare imediatamente de usá-lo e substitua-o por outro.

13. Não altere nem modifique este eletrodo de forma alguma, pois isso pode afetar o desempenho e a precisão, além de anular a garantia do produto.

14. Este eletrodo deve ser usado apenas com o aparelho de ECG.

15. Os eletrodos deverão ser acondicionados após o uso em local limpo e ao abrigo de umidade.

16. Se as cintas de fixação dos eletrodos de membro estiverem muito frouxas, aperte-as suficientemente para que os eletrodos não se movam, sem causar desconforto ao paciente.

17. Se houver mau contato entre o eletrodo e o cabo paciente, verifique se as ligações estão bem feitas.

18. Se houver má aplicação dos eletrodos, verifique se os mesmos estão bem conectados ao paciente, e se a resistência de contato entre eles está baixa pela falta de gel condutor.

19. Os eletrodos devem ser limpos logo após a utilização.

Garantia:

Estes eletrodos estão cobertos pela garantia do fabricante contra defeitos de material e/ou fabricação por um prazo de 90 (Noventa) dias a partir da data da compra.

Validade: Indeterminada

FABRICANTE E DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MASTER MEDIKAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 10.686.941/0001-84
ENDEREÇO: Rua Ver. Victor Manoel de Magalhães, 441 -
Por do Sol - CEP: 37538-082 - Santa Rita do Sapucaí - MG
TEL.: (35) 3471-3682
SITE: www.mastermedikal.com.br

Responsável Técnico: FABIANO VALIAS DE CARVALHO
CREA N° 140720418-1
AFE ANVISA N°: 8.06.020-3 (G8W925M38M17)
NOTIFICAÇÃO ANVISA N°: 80602030011

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Medmax Comércio de Equipamentos Médicos e Sim. Ltda
Av. Cauaxi, n° 293 – Alpha Green Alphaville
CEP: 06454-020 – Alphaville – Barueri – SP
Tel : (11) 4133-6300